



23313665, V3 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.  
© [2013-02.] Alle rechten voorbehouden aan Coloplast A/S, Høldedam 1, 3050 Humlebaek, Denemarken.

## Indicaties

Het product is een steriel polyurethaanschuimverband voor vochtige wondgenezing en exsudaatmanagement.

Het product:

- wordt toegepast bij de behandeling van een breed scala aan exsuderende wonden, zoals beenulcera, decubitus, niet-geïnfecteerde diabetische voetulcera en donorsites;
- kan worden gebruikt voor postoperatieve wonden en schaafwonden
- kan naar het oordeel van een professionele zorgverlener worden gebruikt bij patiënten die worden behandeld voor een lokale of systemische infectie;
- is geschikt voor gebruik in combinatie met een compressiebehandeling;
- kan samen met Purilon Gel worden gebruikt voor effectieve autolytische verwijdering van necrotisch weefsel;
- kan tot 7 dagen lang aangebracht blijven afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat, de staat van het verband en het type wond;
- kan gedurende het gehele genezingsproces worden gebruikt om de aan-gegeven typen wonden te beschermen.

## Informatie

Het product is een absorberend zelfklevend verband met siliconenkleefrand.

Biatain Silicone bestaat uit:

- een zachte geperforeerde siliconencontactlaag;
- een absorberende polyurethaanschuimlaag;
- een afsluitlaag;
- een dampdoorlatende buitenlaag die bacterie- en waterbestendig is.

Biatain Silicone Lite is een flexibel verband met een dunnere schuimlaag dan Biatain Silicone. Het bestaat uit:

- een zachte geperforeerde siliconencontactlaag;
- een absorberende polyurethaanschuimlaag;
- een dampdoorlatende buitenlaag die bacterie- en waterbestendig is.

Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar.

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige indien een allergische reactie optreedt.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

## Let op

Een professionele zorgverlener dient diabetische wonden en wonden die volledig of gedeeltelijk worden veroorzaakt door arteriële insufficiëntie, regelmatig te inspecteren en te behandelen overeenkomstig de lokale richtlijnen.  
Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

Gebruik het product niet in combinatie met oxiderende oplossingen, zoals hypochloriet- of waterstofperoxideoplossingen. Zorg ervoor dat eventuele andere vervliegende oplossingen volledig zijn opgedroogd voordat het verband wordt aangebracht.

Biatain Silicone:

Het product mag niet worden gebruikt als erin geknipt is of als het op een andere

manier beschadigd is.

## Waarschuwing

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in. Recycleren, wassen, ontsmetten en steriliseren kan de productkenmerken verstoren, wat voor de gebruiker een bijkomend risico van lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

## Gebruik van Biatain Silicone en Biatain Silicone Lite

### Vorbereiding

1. Reinig de wond volgens de normale procedures, bv. met lauw water of een fysiologische zoutoplossing.
2. Droog voorzichtig de huid rond de wond.
3. Als een film, crème, zalf of soortgelijk product wordt gebruikt, dient u de huid eerst te laten drogen alvorens het verband aan te brengen.

### Aanbrengen

4. Kies een verband waarvan de schuimlaag de wondranden met minstens 1 tot 2 centimeter overlapt.
5. Gebruik de handgrepen om aanraking van het verband te vermijden en om ervoor te zorgen dat het op aseptische wijze wordt aangebracht. Verwijder de centrale beschermende folie en breng de schuimlaag van het verband op de wond aan. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de zijkanten, zodat het verband verder kan worden aangebracht.



6. Breng de klevende zijde op de wond aan.

### Verwijderen


7. Het product moet worden verwisseld wanneer dit klinisch geïndiceerd is of als exsudaat zichtbaar wordt aan de randen van het verband.
8. Om het verband te verwijderen, tilt u de hoeken van het verband voorzichtig op van de wond. Het verdient aanbeveling de kleefrand los te maken voordat het verband van de wond wordt gehaald.



### Verwijdering

9. Het product is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet met ander normaal huishoudelijk afval worden verwijderd. Spoel het product niet door het toilet.

## Symbolen

	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
--	--