


Niet-adhesief schuimverband
Soft-Hold schuimverband
Adhesief schuimverband
Sacrum
Hiel
Cavity

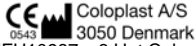

IFU10987 v.6 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © [2011-04] Alle rechten voorbehouden aan Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denemarken.

Waarschuwing

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik kan mogelijk risico voor de gebruiker met zich meebrengen. Hergebruik, reinigen, ontsmetten en steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de patiënt een bijkomend risico op lichamelijke letsel of infectie betekent.

Contra-indicatie

Biatain Soft-Hold-schuimverbanden mogen niet worden gebruikt op donorsites.

Let op

Een professionele zorgverlener dient geïnfecteerde wonden, diabetische wonden en wonden die volledig of gedeeltelijk worden veroorzaakt door arteriële insufficiëntie regelmatig te inspecteren en te behandelen.

Indien een allergische reactie optreedt, dient contact te worden opgenomen met Coloplast voor aanvullende informatie en aanwijzingen.

Gebruik Biatain schuimverbanden en Biatain Cavity niet in combinatie met oxiderende oplossingen, zoals hypochloriet of waterstofperoxide. Zorg ervoor dat eventuele andere vervliegende oplossingen volledig zijn opgedroogd voordat het verband wordt aangebracht.

Biatain Cavity is niet geschikt voor gebruik in droge wonden of diepe wonden met slechts een smalle opening.

Biatain schuimverbanden en Biatain Cavity moeten in een horizontale positie worden bewaard.

Niet blootstellen aan zonlicht.

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt bij gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Indicaties

Biatain schuimverbanden worden toegepast bij de behandeling van een breed scala aan exsuderende wonden, zoals ulcus cruris en decubitus.

Biatain schuimverbanden kunnen ook worden gebruikt voor tweedegraads brandwonden, postoperatieve wonden en schaafwonden.

Biatain niet-adhesieve schuimverbanden worden ook toegepast bij de behandeling van niet-geïnfecteerde diabetische voetulcera.

Biatain niet-klevende en klevende schuimverbanden kunnen ook worden gebruikt voor donorsites.

Biatain schuimverbanden kunnen naar oordeel van de arts worden gebruikt bij patiënten die worden behandeld voor een lokale of systemische infectie.

Biatain schuimverbanden kunnen gedurende het gehele genezingsproces worden gebruikt om de aangegeven typen wonden te beschermen.

Biatain schuimverbanden zijn geschikt voor gebruik in combinatie met compressietherapie.

Biatain schuimverbanden en Biatain Cavity kunnen samen met Purilon Gel worden gebruikt voor effectief autolytisch debridement van necrotisch weefsel.

Biatain Cavity wordt toegepast bij de behandeling van diepe exsuderende wonden, zoals ulcus cruris, decubitus, niet-geïnfecteerde diabetische voetulcera en acute wonden.

Informatie

Biatain schuimverbanden zijn steriele, zachte, sterk absorberende en comfortabele polyurethaan schuimverbanden voor eenmalig gebruik die een vochtig milieu creëren voor optimale wondgenezing en effectief exsudaatmanagement.

Biatain schuimverbanden zijn beschermd met een semipermeabele folielaag die waterdicht is en een barrière vormt voor bacteriën.

Biatain niet-adhesieve schuimverbanden hebben geen kleeflaag en zijn dus geschikt voor gebruik op fragiele huid.

Biatain Soft-Hold schuimverbanden hebben een zachte, gebruiksvriendelijke en gedeeltelijk klevende laag die het verband op zijn plaats houdt terwijl een secundair verband of compressietherapie wordt aangebracht of verwijderd. De kleeflaag bedekt minder dan 50% van het schuimoppervlak.

Biatain klevende schuimverbanden hebben een kleefstrip op basis van hydrocolloïd-technologie.

Biatain Sacrum en Hiel hebben een speciale vorm zodat ze perfect passen op moeilijk te verbinden plaatsen van het lichaam. De adhesieve verbanden hebben een kleefstrip op basis van hydrocolloïd technologie.

Biatain Cavity is geperforeerd voor een flexibele toepassing.

Hoe Biatain gebruiken?

Aanbrengen



Biatain niet-adhesieve schuimverbanden
Het verband moet worden aangebracht met de niet-bedrukte zijde op de wond.



Biatain Soft-Hold schuimverbanden
Verwijder de beschermende film en breng het verband op de wond aan met de niet-bedrukte zijde.



Biatain adhesieve schuimverbanden
Gebruik de handgrepen om aanraking van het verband te vermijden en om ervoor te zorgen dat het op aseptische wijze wordt aangebracht. Verwijder de beschermfolie en breng de schuimlaag van het verband op de wond aan. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de zijanten zodat het verband verder kan worden aangebracht.



Biatain Sacrum
Gebruik de handgrepen om ervoor te zorgen dat het verband op aseptische wijze wordt aangebracht. Verwijder de middelste beschermfolie. Plaats het smalle uiteinde van het verband zo laag mogelijk op de wond en bevestig het verband door naar boven en buiten te werken. Verwijder de handgrepen.



Biatain Hiel
Gebruik de handgrepen om ervoor te zorgen dat het verband op aseptische wijze wordt aangebracht. Verwijder de middelste beschermfolie. Het verband heeft de vorm van een pijl. Vouw het verband in een hoek van 90° tussen de kop en staart van de pijl. Houd het verband zo dat de pijl van de hielpunt weg wijst en bevestig eerst de staart. Bevestig daarna de kop. Verwijder één voor één de handgrepen en bevestig de zijanten voorzichtig zodat de schuimlagen elkaar raken of overlappen.



Biatain Cavity
Verwijder het beschermpapier. Vul ongeveer de helft van de wond losjes met Biatain Cavity. Wanneer Biatain Cavity exsudaat absorbeert, zet het uit zodat deze in korte tijd de holte volledig vult. Modelleer Biatain Cavity op aseptische wijze naar de vorm van de wond door het product losjes volgens de perforaties te vouwen of op te rollen.

Verwijdering



Om het verband te verwijderen, tilt u de hoeken van het verband voorzichtig op van de wond.



Bij het verwijderen van adhesieve verbanden wordt aangeraden de kleeftand los te maken voordat het verband van de wond wordt gehaald.

Biatain Sacrum moet van boven naar beneden in de richting van de anus worden verwijderd om het risico op infecties tot een minimum te beperken.

Aanwijzingen

Biatain schuimverbanden

1. Spoel de wond met lauw water of een fysiologische zoutoplossing. Droog voorzichtig de huid rond de wond. Veilig gebruik van andere reinigingsmiddelen in combinatie met Biatain is niet getest.
2. Als een film, crème, zalf of soortgelijk product wordt gebruikt, dient u de huid eerst te laten drogen alvorens het verband aan te brengen.
3. Haal de Biatain schuimverbanden op aseptische wijze uit de verpakking. Raak de niet-bedrukte zijde van het schuim niet aan.
4. Breng Biatain schuimverbanden volgens de illustraties en aanwijzingen aan. Selecteer een verband waarvan de schuimlaag de wondranden met minstens 2 centimeter overlapt (1 centimeter is voldoende voor kleinere verbanden).
5. Biatain niet-adhesieve schuimverbanden en Biatain Soft-Hold schuimverbanden moeten worden vastgezet met een secundair verband of compressieverband.
6. Biatain schuimverbanden moeten worden verwisseld wanneer dit klinisch geïndiceerd is of als exsudaat zichtbaar wordt aan de randen van het verband.
7. Biatain schuimverbanden kunnen tot 7 dagen lang aangebracht blijven afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat, de staat van het verband en het type wond.

Biatain Cavity (Dezelfde aanwijzingen als hierboven in punt 1 en 2).

1. Breng Biatain Cavity volgens de illustraties en aanwijzingen aan.
2. Gebruik voor de fixatie en afdekking een afzonderlijk verband, zoals b.v. Biatain adhesieve schuimverbanden, Biatain Sacrum (voor sterk exsuderende wonden) of Comfeel Plus Ulcus wondverbanden of Comfeel Plus Transparant wondverbanden (voor matig exsuderende wonden).
3. Er wordt aangeraden Biatain Cavity te vervangen wanneer het secundaire verband wordt verwisseld. Zorg ervoor dat Biatain Cavity volledig uit het wondbed is verwijderd.

Symbol

WO Zendingsorder. Productienummer ter identificatie van de verpakking van een specifieke order. (Het LOT-nummer geeft de productiepartij aan)