



FLAMINAL® FORTE

Eigenschappen

Flaminal® Forte is een Enzyme Alginogel® op basis van alginaten en een antimicrobieel enzymesysteem. Flaminal® Forte bevordert het herstel van een wond op verschillende manieren:

1. Flaminal® Forte houdt de wond zuiver
2. Flaminal® Forte houdt de wond vochtig
3. Flaminal® Forte biedt een antimicrobiële bescherming
4. Flaminal® Forte is veilig voor de huid en het wondweefsel
5. Flaminal® Forte vermindert wondgeur veroorzaakt door bacteriën
6. Flaminal® Forte helpt om overmatige protease activiteit te verminderen (protease = enzyme dat proteïnen afbreekt)
7. Flaminal® Forte beschermt tegen bacteriën in een biofilm en vermindert de biofilm massa
8. Flaminal® Forte beschermt de wondrand

Dit zijn de voornaamste eigenschappen om een wond snel te doen genezen.

Flaminal® Forte is aangewezen bij matig tot sterk exsuderende wonden, zoals:

- sterk exsuderende 2de graads brandwonden (diep, oppervlakkig)
- sterk exsuderende been ulcera
- exsuderende doorligwonden
- exsuderende oncologische wonden
- pre-operatieve wondbed voorbereiding



een Belgische onderneming

TEL 00 32 3 825 70 63 • FAX 00 32 3 226 46 58 • info@flenpharma.com

Gebruiksaanwijzing

Het aanbrengen of opnieuw aanbrengen van Flaminal® Forte op een wond is gemakkelijk en pijnloos. Ga als volgt tewerk:

1. Eerst de wond reinigen en spoelen (bv. met Flamirins®)
2. Voorzichtig droogdeppen
3. Het volledige wondbed bedekken met Flaminal® Forte
4. U bedekt Flaminal® Forte met een verband. De keuze van het verband wordt bepaald door de aard van de wond:
 - Matig exsuderende wond: transparante film (polyurethaan) of vetverband met een niet klevende windel
 - Sterk exsuderende: non-woven gaaskompres met een niet klevende windel of met een hypoallergene kleefpleister
 - Zeer sterk exsuderend: absorberend, niet klevend kompres met een niet klevende windel of een hypoallergene kleefpleister



Goed om weten

- Het verband dagelijks controleren. Indien er lekken zijn of onvoldoende gel, Flaminal® Forte vervangen en een nieuw verband aanleggen.
- Indien tijdens de behandeling met Flaminal® Forte droge, witte alginaatschilfers op de wondrand verschijnen, laat u deze. Ze beschermen tegen verwerking van de wondrand. Verwerking vertraagt de wondheling.
- Indien droge, witte alginaatschilfers in de wond verschijnen, dan is de wond te droog voor Flaminal® Forte en gebruikt u beter Flaminal® Hydro.
- Het verband met Flaminal® Forte kan ter plaatse blijven zolang de gelstructuur intact is (1 à 4 dagen, afhankelijk van de mate van exsudaat).
- In de beginfase van de behandeling kan u de indruk hebben dat de wond vergroot. Dit is een normaal gevolg van het genezingsproces waarbij het dood weefsel wordt verwijderd.
- Aangezien alginaten natuurlijke producten zijn, kan de kleur lichtjes veranderen. De kleurverandering heeft geen invloed op de kwaliteit van Flaminal® Forte.



een Belgische onderneming

TEL 00 32 3 825 70 63 • FAX 00 32 3 226 46 58 • info@flenpharma.com

Bijzondere gevallen

- Ulcus cruris (beenzweer): Kleefstoffen geven vaak allergie, vooral bij ulcus cruris patiënten. Gebruik een niet klevende windel.
- Ondermijnde wonden: Plaats steriele gaastampons als steun in de holtes en gebruik een voldoende hoeveelheid Flaminal® Forte in de holtes tussen de tampons.
- Fistels en smalle diepe wondholtes: Injecteer Flaminal® Forte voorzichtig in de holte met een daarvoor bestemde canule.
- Sterk exsuderende wonden: Breng een dikkere laag Flaminal® Forte aan.
- Weinig exsuderende wonden: Breng Flaminal® Hydro aan.
- Exsuderende hielzweren: Breng Flaminal® Forte aan en bedek met een verbandgaas in de vorm van een V.

Voorzorgen

Bij bepaalde wonden kan een aanvullende behandeling gewenst zijn. Raadpleeg een arts of wondspecialist.

Flaminal® Forte kan bij geïnfecteerde wonden worden gebruikt onder medisch toezicht.

Alginaten hebben een weeë geur die geen invloed heeft op de wondheling. Indien de geur echter plots meer uitgesproken wordt, raadpleeg een arts of wondspecialist.

Flaminal® Forte mag niet worden gebruikt bij patiënten met een gekende allergie voor één van de bestanddelen (zie "Composition").

Flaminal® Forte mag niet op de oogleden of in de ogen worden aangebracht. Indien dit toch gebeurt, dient u de ogen goed te spoelen met stromend water. Raadpleeg een arts.

Bewaring

Bewaren op kamertemperatuur (niet meer dan 25°C) op een droge plaats in de originele verpakking. De vervaldatum (USE BY) jaar/maand is de eerste dag van de aangegeven maand en jaar. Onmiddellijk na gebruik, de tube of pot goed afsluiten.

Eens geopend en indien telkens goed afgesloten, kan een tube Flaminal® Forte bewaard en gebruikt worden tot de vervaldatum op de tube en doos. Een pot Flaminal® Forte 500gr kan niet langer worden gebruikt dan één week na de eerste opening.

We bevelen bovendien aan dat een verpakking Flaminal® Forte wordt gebruikt bij één enkele patiënt.

Verpakkingsvormen

- Tube 10g
- Tube 30g
- Tube 50g
- Doos met 5 tubes van 15g
- Pot 500g

Niet alle verpakkingsvormen zijn in elk land beschikbaar.

Composition

Alginate (total alginate content 5.5% (g/g)); macrogol; enzyme system (glucose oxidase, lactoperoxidase, glucose, guaiacol); potassium sorbate; buffer; purified water Ph. Eur.



een Belgische onderneming

TEL 00 32 3 825 70 63 • FAX 00 32 3 226 46 58 • info@flenpharma.com