

# Gebruiksaanwijzing

## **Flaminal**<sup>®</sup>

• oppervlakkige wonden

➤ **Flamigel**<sup>®</sup>



- Hydroactieve colloïd gel
- Hydratie of absorptie
- Arginine  
(versnelt en verbetert de wondheling)

• acute of chronische wonden

**LICHT TOT MATIG** exsuderend

➤ **Flaminal**<sup>®</sup> **Hydro**



- Enzym alginogel<sup>®</sup>
- Alginaten **3,5%** + PEG\*  
(debriderend / absorberend / hydraterend)
- Antimicrobieel enzymcomplex\*\*

• acute of chronische wonden

**MATIG TOT STERK** exsuderend

➤ **Flaminal**<sup>®</sup> **Forte**



- Enzym alginogel<sup>®</sup>
- Alginaten **5,5%** + PEG\*  
(debriderend / **sterk** absorberend)
- Antimicrobieel enzymcomplex\*\*

1 Spoel en reinig de wond met Flamirins<sup>®</sup>.  
Voorzichtig droogdeppen.

2 Het volledige wondbed bedekken met een  
dikke laag (0,5 cm). Flaminal<sup>®</sup> met een  
vetgaas én absorberend verband fixeren óf  
een schuimverband.



Flaminal<sup>®</sup> Hydro / Flaminal<sup>®</sup> Forte

## PRODUCTGAMMA

 **Flen Pharma**  
advanced skin healing

[www.flenpharma.com](http://www.flenpharma.com)

\* polyethyleenglycol

\*\* glucose oxidase + lactoperoxidase + guaiacol

# Flamirins®

# Flamigel®

# Flaminal® Hydro

# Flaminal® Forte

# extracalm®

## ISOTONE WONDREINIGER

met zure pH



- reinigt door spoeling
- verwijdert onzuiverheden
- vermindert het risico op infectie

**2 standen:**  
**1. nevel (SPRAY)**  
**2. straal (STREAM)**

250 ml - Z-Indexnr 15634019 - art.nr. 1102-B

## OPPERVLAKKIGE WONDEN

Hydroactieve colloïd gel



- schaafwonden
- snijwond
- brandwond 1<sup>ste</sup> graad
- zonnebrand
- droge necrose

20g - Z-Indexnr 15921670 - art.nr. 1036-N  
 40g - Z-Indexnr 15901831 - art.nr. 1037-N

## LICHT TOT MATIG exsuderende wonden

Enzym alginogel®



acut,  
chronisch,  
gecontamineerd  
of geïnfecteerd\*



- skin tears
- complexe schaafwonden
- 2<sup>de</sup> graads brandwonden
- ulcera (veneus, arterieel, diabetisch)
- radiodermatitis
- oncologische wonden
- chirurgische wonden
- doorligwonden

\*In geval van infectie kan een bijkomende  
behandeling worden aangeraden.  
Pot na opening, 1 week houdbaar.

25g - Z-Indexnr 15785882 - art.nr. 1031-N  
 40g - Z-Indexnr 15785904 - art.nr. 1032-N  
 500g - Z-Indexnr 15633934 - art.nr. 1010-N

## MATIG TOT STERK exsuderende wonden

Enzym alginogel®



acut,  
chronisch,  
gecontamineerd  
of geïnfecteerd\*



- 2<sup>de</sup> graads brandwonden
- ulcera (veneus, diabetisch)
- doorligwonden
- oncologische wonden

\*In geval van infectie kan een bijkomende  
behandeling worden aangeraden.  
Pot na opening, 1 week houdbaar.

25g - Z-Indexnr 15785912 - art.nr. 1033-N  
 40g - Z-Indexnr 15785920 - art.nr. 1034-N  
 500g - Z-Indexnr 15633888 - art.nr. 1016-N

## DE ANTI-JEUK GELSPRAY



DIRECT KALMEERT EN VERKOEFT



zonder  
cortisone

- 1 Schud de spuitbus.
- 2 Hou de spuitbus 10 tot 15 cm van de huid.
- 3 Hou de spuitbus rechtop en spuit tot de te behandelen huid helemaal bedekt is.

NIET INWRIJVEN

150ml - Z-Indexnr 15602540 - art.nr. 1014-B