

Proshield® Plus en Proshield® Foam & Spray



Het effectieve systeem voor behandeling en reiniging van de huid bij vochtletsel en decubitus*

Werkt tevens preventief

- Eén systeem voor beschadigde en intacte huid
- Geschikt voor dagelijks gebruik
- Meer comfort voor de patiënt
- Zeer gebruikersvriendelijk
- Zinkvrij, dus geschikt voor patiënten met radiotherapie
- Kosteneffectief: minder producten nodig
- Kosteneffectief: lagere dosering mogelijk (in schuimvorm)
- Effectiever dan bestaande producten

* Decubitus t/m graad 2



HIGH QUALITY SOLUTIONS IN BIOLOGICAL TREATMENT

Proshield®
Dicht het gat
tussen continentie
en wondzorg



Proshield® Plus en Proshield® Foam & Spray Cleanser

Het Proshield System herstelt en reinigt de huid, helpt irritatie te voorkomen en biedt langdurige bescherming tegen de gevolgen van incontinentie en decubitus

Het Proshield System bestaat uit slechts twee producten, maar is multifunctioneel inzetbaar bij patiënten met (een verhoogd risico op) decubitus en/of vochtletsel als gevolg van o.a. incontinentie. Beide Proshield producten zijn geschikt voor zowel de reeds beschadigde als de nog intacte huid. Internationaal bewijst Proshield zich al jaren als effectiever bij het voorkomen en behandelen van doorlig- en vochtletselwonden dan vergelijkbare producten (zie cases). Nóg een groot voordeel van dit compacte systeem is dat het de taken kan overnemen van een veelvoud

aan producten die in de huidige situatie gebruikt en op voorraad worden gehouden. Dat reduceert opslagbehoefte, gebruiksfouten en weggooverlies. Deze combinatie van grotere effectiviteit en méér kostenefficiëntie verklaart waarom ook in Nederland steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen overstappen op Proshield. Daarnaast is Proshield uiterst gebruikersvriendelijk en verhoogt het de kwaliteit van leven voor een grote groep extra kwetsbare patiënten.

Proshield Plus



Proshield Plus is een gladde, dikvloeibare, vetvrije en geurloze siliconencreme die zowel curatief als preventief werkt tegen huidirritatie en -beschadiging als gevolg van decubitus t/m graad 2 en vochtletsel.

Proshield Plus is geschikt voor dagelijks gebruik en hecht goed aan zowel vochtige als droge huid, maar is gemakkelijk verwijderbaar. Eenmaal aangebracht biedt Proshield Plus langdurig bescherming

tegen schadelijke vochtinwerking. Tegelijkertijd creëert Proshield binnen het aanbrengingsgebied een milieu waarin wondheling wordt bevorderd.

Dagelijkse reiniging, preventie en wondheling gecombineerd in één compact systeem voor kwetsbare patiënten.

Proshield Foam & Spray Cleanser



Proshield Foam & Spray Cleanser is een mild, licht geparfumeerd, drijfgasloos, vocht-inbrengend reinigingsmiddel (pH 5.5-6) dat zonder water kan worden gebruikt. Het is ontwikkeld voor het reinigen van de huid bij mensen met incontinentieproblematiek en een verhoogd risico op, of aanwezigheid van decubitus t/m graad 2, als voorbehandeling voor het aanbrengen van Proshield Plus.

Daarnaast is deze cleanser uitstekend geschikt voor de algehele dagelijkse lichaamsverzorging en als shampoo. Omdat Proshield werkt zonder water en als foam goed aan de huid hecht, is het ideaal voor de dagelijkse verzorging van bedlegerige patiënten. Dankzij de ingenieuze, met één hand bedienbare, flacon kan het product naar behoefte worden opgebracht in schuimvorm of in nevelvorm (voor grotere huidoppervlakken). Dit gebeurt overigens zonder gebruik van drijfgas, wat milieu- en afvoerproblemen beperkt. In schuimvorm gaat Proshield Foam & Spray Cleanser twee tot drie keer langer mee dan traditionele pompvernevelaars voor incontinentiereiniging.

Helend en beschermend bij decubitus

Decubitus ('doorliggen') is weefselversterf veroorzaakt door zuurstoftekort als gevolg van de inwerking van druk-, schuif- of wrijfkraften op het lichaam, met name waar bot voor tegendruk zorgt. Vooral langdurig zieke, niet of weinig mobiele patiënten lopen een verhoogd risico op decubitus. Men onderscheidt 4 graden van decubitus. Proshield biedt bescherming tot en met graad 2; een beschadiging (blaar of ontvelling) van de epidermis, waarbij ook de dermis kan zijn aangetast.

Helend en beschermend bij vochtletsel

Vochtletsel kan gedefinieerd worden als chemische irritatie en huidverweking door de continue inwerking van urine, faeces, transpiratie en/of wondvocht. Als gevolg daarvan kunnen schuifkrachten leiden tot erosie van de verweekte huidlagen. Voor de effectiviteit van Proshield maakt het onderscheid tussen decubitus en vochtletsel niet uit: het systeem werkt voor beide categorieën van huidbeschadiging zowel curatief als preventief.

Indicaties

Proshield Foam & Spray Cleanser is geïndiceerd

- als dagelijks reinigingsmiddel op zowel intacte als beschadigde huid
- als reinigingsmiddel vóór het opbrengen van Proshield Plus

Proshield Plus is geïndiceerd

- ter behandeling en voorkoming van huidbeschadiging door vochtletsel bij (chronische) diarree of urine-incontinentie
- ter behandeling en voorkoming van huidirritatie of -beschadiging als gevolg van decubitus graad 1 en 2
- ter behandeling en voorkoming van huidirritatie of -beschadiging als gevolg van smetten (combinatie met antimycoticum mogelijk)



Contra-indicaties

Proshield niet gebruiken bij patiënten die allergisch zijn voor één of meer van de bestanddelen.

Toepassing Instructies voor gebruik:

Reinig de huid vooraf met Proshield Foam & Spray Cleanser.


1. Maak de spuitflacon Proshield Foam & Spray Cleanser gebruiksklaar door de pomp enige malen in te drukken. Voor gebruik als spray zet u de spuitmond op 'on'. Spuit de cleanser direct op de huid.
2. Zet voor kleinere huidoppervlakken de flacon in de schuimstand door het uiteinde van de spuitmond (in 'on'-stand) naar voren te trekken.
3. Afnemen met een droge handdoek. Geen water of andere vloeistof nodig.

Breng voldoende Proshield Plus aan.

1. Reinig de huid vooraf, bij voorkeur met Proshield Foam & Spray Cleanser.
2. Breng voldoende Proshield Plus aan en herhaal zo vaak als nodig. Breng een extra laag aan vóór het slapen gaan of wanneer om andere redenen langdurig contact met natte luiers of kleding te voorzien valt.



Na 15 dagen

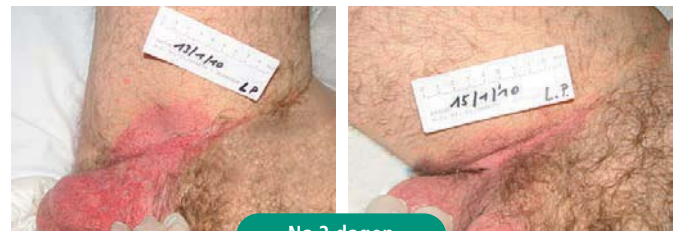


Na 2 dagen



Na 4 dagen



Na 6 dagen

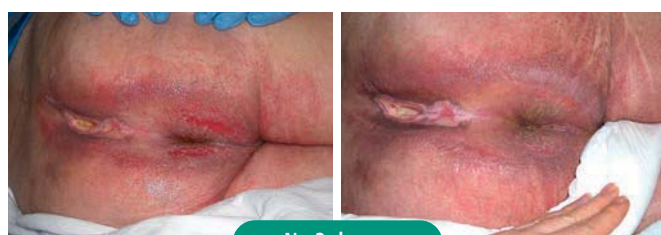

Na 2 dagen



Na 7 dagen

BiologiQ™

HIGH QUALITY SOLUTIONS IN BIOLOGICAL TREATMENT



VEILIGE OPLOSSINGEN VOOR WONDHELING EN INFECTIEBESTRIJDING

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming met innovatieve biotech oplossingen voor de gezondheidszorg. BiologiQ streeft daarbij stelselmatig naar kortere behandelingstijden en een betere kwaliteit van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel de patiënt als de zorgverstrekker.

Totaalconcept in Actief Wond Management

Het Wond Managementsysteem van BiologiQ bestaat uit innovatieve bio-actieve oplossingen, gericht op het stimuleren van het eigen regeneratief vermogen van het lichaam en gebaseerd op een toenemend inzicht in de biologie van de (complexe) wond. BiologiQ biedt daarmee een welkome aanvulling op de traditionele methoden van infectiebestrijding en wondbehandeling.

www.BiologiQ.nl

© 2012 BiologiQ, Healthpoint. Alle rechten voorbehouden. Proshield® en Healthpoint® zijn geregistreerde handelsmerken van Healthpoint Ltd., Ft. Worth Dallas, Texas, US.

Proshield® Plus en Proshield® Foam & Spray Cleanser

Productie en CE-registratie

Proshield® wordt geproduceerd door Healthpoint Ltd., Fort Worth, Texas, U.S.A. 76107.

www.Healthpoint.com

EC representative: Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH The Hague, The Netherlands.

Tel: (+31) 70 345-8570, Fax: (+31) 70 346-7299.

Proshield® Plus en Proshield® Foam & Spray Cleanser zijn CE-goedgekeurd.

Vergoeding

Zie www.BiologiQ.nl voor vergoeding van Proshield® Plus en Proshield® Foam & Spray Cleanser.

Verpakkingshoeveelheid

Proshield Plus	Productcode	Z-Index nummer
12 x tube 115 gr.	8213-0300-04	15315118
Proshield Foam & Spray		
12 x sprayflacon 235 ml.	8213-0150-08	15315096

Verkrijgbaarheid en bestelinformatie

Proshield® kan worden besteld bij apotheker, groothandel of bij de distributeur BiologiQ:

telefoon (055) 368 44 50. Fax (055) 368 44 66.

GOEDE LOGISTIEK • INNOVATIEVE CONCEPTEN • HIGH QUALITY ALS STANDAARD

BIOLOGIQ • WATERMANSTRAAT 66 • 7324 AK APELDOORN - NL
T +31(0)55 368 44 50 • F +31(0)55 368 44 66 • E INFO@BIOLOGIQ.NL • I WWW.BIOLOGIQ.NL