

Het Suprasorb® Team voor vochtige wondverzorging

De juiste koers voor snelle wondgenezing **Suprasorb® C** **Collageen**

voor stagnerende wonden

Suprasorb®

- A** Alginaat
- P** PU-Schuimverband
- H** Hydrocolloïd
- M** PU-Membraan
- F** Folie
- G** Gel
- C** Collageen

Suprasorb®
één naam voor
een vochtig
wondmilieu -
compleet en
professioneel



Lohmann  Rauscher



Suprasorb® C Collageen

De juiste koers bij stagnerende wonden

Uit de praktijk:




1

Therapieresistent ulcus cruris venosum, meer dan 5 jaar aanwezig



2

Wond reinigen, Collageen losjes aanbrengen, afdekken met Suprasorb® H Hydrocolloïd. In het begin wordt het verband dagelijks gewisseld, later om de drie dagen.

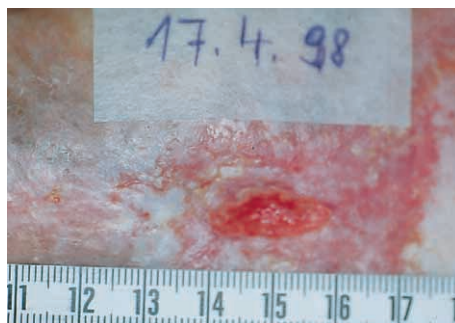

3

Dag 91: de wond is kleiner geworden en er is een begin van epitheelvorming. Voor de verdere behandeling werd Suprasorb® M PU-Membraan gebruikt.

Een golf van pluspunten

3 waterdichte voordelen voor vochtige wondverzorging met Suprasorb® C Collageen

- Bevordert het ontstaan van granulatieweefsel

Door een uitgesproken capillaire werking als gevolg van de sterk poreuze structuur, worden vocht, afgestoten necrotisch materiaal, cel- en fibrineresten, goed opgenomen.

- Breed inzetbaar

Suprasorb® C Collageen bevordert elke fase van het genezingsproces bij stagnerende wonden.

- Natuurlijke en biologische bloedstelping.



Een leidraad in 5 knopen

Afkoersend op wondgenezing



1. Reinig de wond met een steriele oplossing of fysiologische zoutoplossing, en dep daarna de gezonde

huid rond de wond zorgvuldig droog met steriele wondkompresen.



4. Druk het verband zachtjes aan; dit verbetert het contact met het wondoppervlak. Zorg dat ook kleine delen van een

defect bedekt worden.



2. Knip het verband op maat – afhankelijk van de grootte van de wond – en leg de kant die in de verpakking

onderop ligt (de kant met de fijne poriën) op de wond.



5. Fixeer het verband – afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat – met Suprasorb® F Folie, Suprasorb® M PU-

Membraan of Suprasorb® H Hydrocolloïd. Hiermee voorkomt u tevens dat de wond uitdroogt.



3. Bevochtig het verband met wat steriele oplossing als de wond (bijna) droog is.

Suprasorb® C Collageen in drie uitvoeringen



Afmeting:	Artikelnummer	Z-index nummer	Memo Code	Inhoud Verpakt per
Suprasorb® C Collageen aseptisch				
4 x 6 x 0,8 cm	20481	14555808	SUPRV4	5
6 x 8 x 0,8 cm	20482	14555816	SUPRV6	5
8 x 12 x 0,8 cm	20483	14555824	SUPRV8	5

Alle producten zijn steriel en per stuk verpakt

Afkoersend op succes ook bij stagnerende wondgenezing

**Collageenspons uit steriel, uiterst zuiver
rundercollageen zonder netwerkstructuur**

De collageenspons, ongemodificeerd collageen met een sterk poreuze structuur, wordt gebruikt voor de genezing van stagnerende wonden, ongeacht de mate van exsudatie, zoals:

- brandwonden
- postoperatieve weefseldefecten
- ulcera van uiteenlopende aard

En voor een natuurlijke en biologische
bloedstelping

Alles aan boord

Het Suprasorb® team
voor een vochtig wondmilieu



Suprasorb® één naam voor
een vochtig wondmilieu -
compleet en professioneel

Lohmann & Rauscher B.V.
Antennestraat 86, 1322 AS Almere
Postbus 10117, 1301 AC Almere
Tel.: (036) 546 30 30
Fax: (036) 546 30 31
E-mail: info@nl.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.nl
www.wondverzorging.nl

30576 / 0403 / NL

Lohmann + Rauscher