



Veilige insteekopeningen

 **smith&nephew**
ACTICOAT[®] SITE
Antimicrobieel barrièrekompres
with
SILCRYST[®]
NANOCRYSTALS

ACTICOAT[◊] Site, voor veilige insteekopeningen

ACTICOAT Site is een antimicrobieel absorberend kompres dat uit 3 lagen bestaat:

- Een Nanokristallijn zilverhoudende polyurethaan wondcontactlaag
- Een witte polyurethaan foamlaag
- Een blauwe waterdichte polyurethaan folielaag

Het kompres biedt een effectieve antimicrobiële barrière tegen microbiële contaminatie en beschermt de insteekopening snel (binnen 30 min.) en langdurig (7 dagen lang) tegen binnendringende ziekteverwekkende micro-organismen. Nanokristallijn zilver is ook effectief tegen al in de wond aanwezige micro-organismen.

Indicaties

ACTICOAT Site kan gebruikt worden bij insteekopeningen, catheters en centrale lijnen, tevens biedt het bescherming tegen infectie bij gebruik van pennen zoals externe fixateurs (botbreuken). ACTICOAT Site kan tot 7 dagen lang blijven zitten.



ACTICOAT Site kan gebruikt worden bij geïnfecteerde insteekopeningen. In dit geval dient de infectie conform het lokale klinische protocol behandeld te worden.

Contra-indicaties


- Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor zilver
- Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor polyurethaan
- Niet gebruiken bij patiënten die een MRI (Magnetic Resonance Imaging) onderzoek ondergaan

Voorzorgsmaatregelen

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik
- ACTICOAT Site niet gebruiken in combinatie met producten op oliebasis, zoals bijvoorbeeld vaseline
- ACTICOAT Site is mogelijk niet compatibel met lokale antimicrobiële producten, hiervoor zijn nog geen specifieke testen uitgevoerd
- ACTICOAT Site niet gebruiken in combinatie met oxiderende oplossingen (bijvoorbeeld Eusol) aangezien dergelijke stoffen het absorberende polyurethaan bestanddeel van het kompres kunnen afbreken
- Vermijd contact met electrodes of geleidende gels gedurende elektronische metingen, bv. EEG's en ECG's
- Voor toepassen van bestralingstherapie, dient ACTICOAT Site verwijderd te worden. Na behandeling kan een nieuw kompres aangebracht worden
- Indien roodheid of gevoeligheid van de huid optreedt, stop dan met het gebruik
- Bij het aanbrengen kan tijdelijk pijn ervaren worden. Dit kan geminimaliseerd worden door zorgvuldig de volgende aanbrenginstructies te volgen. Indien de pijn continu aanhoudt na het aanbrengen, verwijder dan het kompres en stop met het gebruik

Gebruiksaanwijzing

Indien nodig kan de huid rondom de wond conform plaatselijk geldend protocol gereinigd worden. Gebruik geen zoutoplossing.

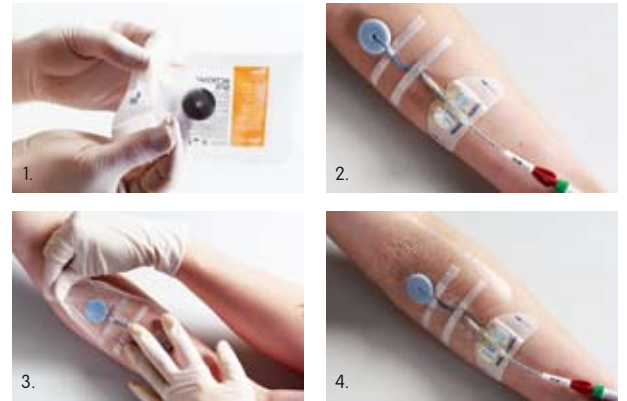

1. Haal ACTICOAT Site aseptisch uit de verpakking. Het kompres niet bevochtigen voor gebruik.
2. Breng ACTICOAT Site aseptisch rond de insteekopening aan, zodat ACTICOAT Site het gebruikte materiaal compleet omringt. Zorg ervoor dat de zilveren laag goed contact maakt met de insteekopening en de blauwe zijde van het kompres dient van de huid afgekeerd te zijn.
 - Zorg ervoor dat de inkeping zich naast of onder het ingebrachte materiaal bevindt.
 - Zorg ervoor dat de randen van de inkeping tegen elkaar vallen zodat het kompres goed contact maakt met de omliggende huid.
3. Fixeer het kompres met een secundair fixatiekompres zoals bijv. IV3000[°].
4. Het kompres kan tot 7 dagen lang blijven zitten. Indien wondvocht doorlekt, dient het kompres eerder vervangen te worden. Indien het kompres zich aan de insteekopening hecht, bevochtig of week het kompres dan los om ervoor te zorgen dat de insteekopening niet beschadigd raakt.

NB

- Uitsluitend één kompres gebruiken per insteekopening
- ACTICOAT Site kan tijdelijke verkleuring van de omliggende huid veroorzaken

Bestelnummer	Afmeting disk	Verpakking
66001788	25 mm (4 mm opening)	10

Wondverzorging

Smith & Nephew B.V.
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp
T 020 - 654 39 99
F 020 - 653 20 99
E holland.info@smith-nephew.com

www.smithnephew.nl
www.acticoat.com

[†] Nanokristallijn Zilver is een gepatenteerde technologie van NUCRYST Pharmaceuticals Corp.

[™] SILCRYST is een handelsmerk van NUCRYST Pharmaceuticals Corp., gebruikt in licentie.

[°] Handelsmerken van Smith & Nephew