

 **smith&nephew**

ALLEVYN[®]

CAVITY

Driedimensionaal
hydrocellulair kompres

Diep cavitair wondkompres



ALLEVYN[◊] Cavity is een diep cavitair wondkompres

De toepassing van ALLEVYN Cavity gevormde tampons betekent een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling en genezing van diepe wonden. De kern van het product bestaat uit foamdeeltjes met een bijzonder hoog absorberend vermogen, omgeven door een niet verklevende, geperforeerde film coating. ALLEVYN Cavity combineert een maximum aan absorptie en comfort met gebruiksgemak. Bovendien hebben verbandwisselingen met ALLEVYN Cavity minder beschadiging van het tere weefsel tot gevolg.

Voordelen

Extreem hoog absorptievermogen

ALLEVYN Cavity gevormde tampons zijn ontwikkeld om de problemen tegen te gaan die zich voordoen bij de behandeling van diepe, sterk exsuderende wonden. Het extreem hoge absorberende vermogen van de tampons ontstaat doordat het wondvocht niet alleen door capillaire werking wordt opgenomen (zoals bij traditionele verbanden het geval is), maar ook door absorptie van vocht in de structuur van het foam. Doordat frequente verbandwisselingen niet nodig zijn, is de toepassing van ALLEVYN Cavity bij de behandeling van diepe chronische wonden dan ook zeer kosteneffectief.

Vormt zich naar de contouren van de wond

ALLEVYN Cavity gevormde tampons zijn beschikbaar in diverse vormen en maten en zijn dan ook geschikt voor de behandeling van alle diepe wonden. De tampon is zeer zacht en vormt zich naar de wond, hetgeen door de patiënt als zeer comfortabel ervaren wordt. Tevens maakt de tampon optimaal contact met het wondoppervlak, waardoor absorptie van wondvocht optimaal is. Hierdoor wordt de kans op het ontstaan van abscessen geminimaliseerd.

Eenvoudig in gebruik


ALLEVYN Cavity gevormde tampons zijn individueel steriel verpakt in handige bakjes. Indien nodig kunnen meerdere tampons in een wond gebruikt worden. De juiste tampon of combinatie kan eenvoudig en snel in de diepe wond aangebracht worden. Verpleegkundige interventie is daardoor eenvoudiger en meer effectief.

Superieure, niet verklevende eigenschappen

Het driedimensionale honingraat-vormige oppervlak van de ALLEVYN Cavity gevormde tampons zorgt ervoor dat deze niet aan de wond verkleeft, waardoor trauma en beschadiging van het granulatieweefsel bij verbandwisseling geminimaliseerd worden.

Bevordert snelle wondgenezing

ALLEVYN Cavity creëert een vochtige omgeving, waardoor korstvorming wordt tegengegaan en de wond sneller geneest.

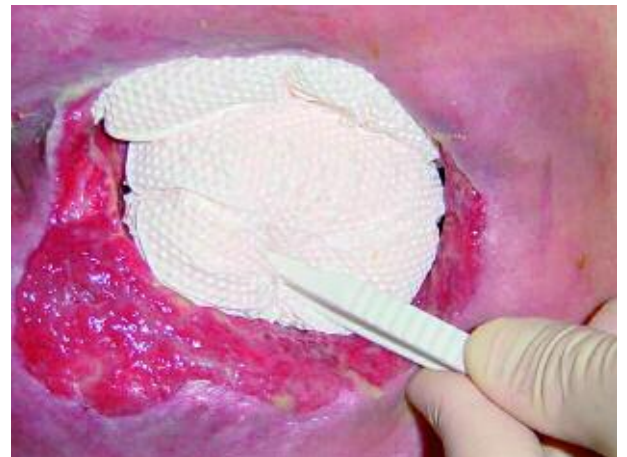

Indicaties

ALLEVYN Cavity is ontwikkeld om een snelle wondgenezing van gecompliceerde open wonden te bevorderen en voor de behandeling van wonden die niet primair gesloten zijn. Specifiek: Diepe decubituswonden en beenulcera, incisies en andere chirurgische wonden, bijvoorbeeld sinus pilonidalis.

Applicatie

ALLEVYN Cavity gevormde tampons kunnen worden afgedekt met OPSITE. Bij een gevoelige huid rondom de wond kan hiervoor ook een absorberend verband of een pleister gebruikt worden.

Voorzorgsmaatregelen

ALLEVYN Cavity mag niet hergebruikt worden. Gebruik ALLEVYN Cavity niet in combinatie met hypochloriet oplossing (bijv. Eusol) of waterstofperoxide. Deze stoffen kunnen de foam aantasten. Vermijd het gebruik van een pincet bij het aanbrengen van de tampons omdat dit de coating kan beschadigen. Zorg ervoor dat het aantal gebruikte klossen in de wond genoteerd wordt en dat dit gecontroleerd wordt bij verwijdering.

Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
66007326	5 cm rond	10
66007327	10 cm rond	5
66007328	9 x 2,5 cm tubulair	10
66007329	12 x 4 cm tubulair	5