



Kies een ALLEVYN[®] kompres

Status van de wond

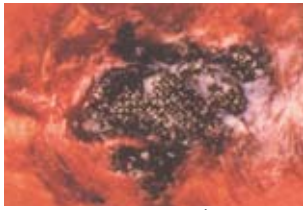

Necrotisch

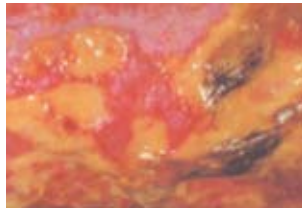

Verweekt



Granulerend



Epitheliserend

ALLEVYN kan gebruikt worden als een afdekkend kompres (eventueel in combinatie met andere producten) om de wond te beschermen en exsudaat te absorberen.

ALLEVYN is eenvoudig aan te brengen. Het stimuleert een snelle genezing en het verbetert het comfort van de patiënt doordat een vochtige wondomgeving wordt gecreëerd.

De hoeveelheid exsudaat is:

beperkt
ALLEVYN Lite








middelmatig
ALLEVYN

veel
ALLEVYN Plus

Voor de meest voorkomende oppervlakkige wonden

Bij gevoelige huid	 ALLEVYN Lite [Niet klevend]	 ALLEVYN Non-Adhesive [Niet klevend]	
Als de omliggende huid niet gevoelig is		 ALLEVYN Adhesive [Klewend]	 ALLEVYN Plus Adhesive [Klewend]

Voor wonden waarbij een speciaal kompres nodig is

Voor plaatsgebonden wonden	 ALLEVYN Thin [Klewend]	 ALLEVYN Sacrum [Klewend]	 ALLEVYN Compression [Klewend]	 ALLEVYN Heel [Niet klevend]	 ALLEVYN Plus Sacrum [Klewend]
Als de wond diep is		 ALLEVYN Cavity [Niet klevend]		 ALLEVYN Plus Cavity [Klewend]	

Een kompres voor tracheostoma is ook beschikbaar

