



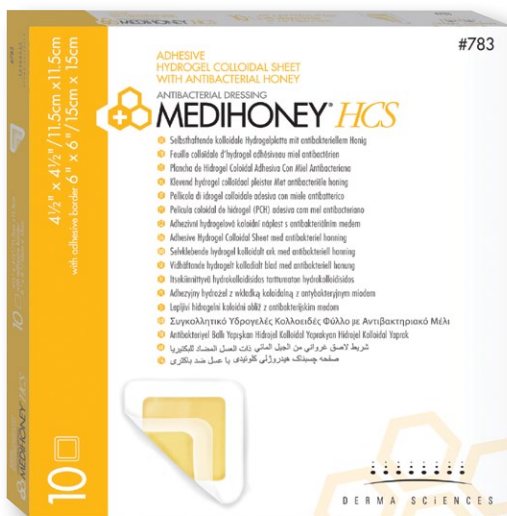

ANTIBACTERIAL DRESSING MEDIHONEY®

HCS (Hydrogel-Colloïdverband) met actieve *Leptospermum Sp.* honing!

NIEUW!

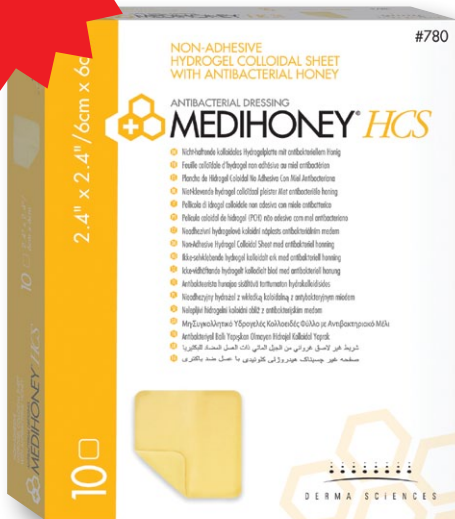

Medihoney® HCS Hydrogel-Colloïdverband is een niet verklevend antibacterieel wondverband. Het combineert de unieke eigenschappen van *Leptospermum Scoparium* honing met de werking van Super Absorbent Polymer (SAP) technology en Hydrogel. Daarmee is Medihoney HCS een 'alles-in-één' verband met een 3-tal functies. Het is sterk **antibacterieel**, het **absorbeert** bij een vochtige wond én het **hydrateert** de droge wond. Dit verband is zeer geschikt voor droge tot matig exsuderende wonden en is in diverse afmetingen met en zonder border leverbaar.

EIGENSCHAPPEN

- hydraterende en absorberende eigenschappen; zorgt voor continue optimaal vochtig wondmilieu
- effectief tegen breed spectrum micro-organismen inclusief *Pseudomonas A.* en resistente stammen
- effectief tegen bio-films
- ondersteunt effectief debridement
- stimuleert immunoreacties in de wond
- remt schadelijke proteasenactiviteit
- bevat 63% antibacteriële *Leptospermum Scoparium* (Manuka) honing
- voor droge tot matig exsuderende wonden
- verkoelend en verzachtend effect

INDICATIES

- diabetische voet
- ulcus cruris
- decubitus (I - IV)
- 1e- en 2e graad brandwonden
- donor sites
- oncologische wonden
- skin-tears

SNELLERE WONDGENEZING

Medihoney® dressings geven een 30% snellere wondgenezing vergeleken met standaard methoden (1) en zorgen voor een sneller debridement dan hydrogels (2).

1. Robson V, Dodd S, Thomas S. Standardized antibacterial honey (Medihoney™) with standard therapy in wound care: randomized clinical trial. *J of Advanced Nursing* 2009;65(3):565-575.
2. Gethin G, Cowman S. Manuka honey vs. hydrogel - a prospective, open label, multicentre, randomised controlled trial to compare desloughing efficacy and healing outcomes in venous ulcers. *J of Clinical Nursing* 2008;18(3):466-474.



SpringMedical
Wondzorg met visie

SpringMedical
Driehoek 7
7312 CN Apeldoorn
☎ 0031(0)55-3560544
🌐 www.springmedical.nl
✉ info@springmedical.nl

HCS (Hydrogel-Colloïdverband) met actieve *Leptospermum Sp.* honing!



TOEPASSING

1. Bescherm de kwetsbare wondranden met een geschikte barrière crème zoals MEDIHONEY® Barrier Cream.
2. Kies de juiste afmeting MEDIHONEY®HCS verband zodanig dat deze de wondranden minimaal 2cm overlapt.
3. Breng de MEDIHONEY®HCS op de wond aan zodanig dat deze goed contact maakt met het gehele wondbed (het verband mag de wondranden en intacte huid overlappen). MEDIHONEY®HCS is eveneens zeer geschikt om rondom een katheter-insteekopening aan te brengen.
4. De MEDIHONEY®HCS kan op de gewenste afmetingen geknipt worden. Voor MEDIHONEY®HCS gebruik een secundair (buis) verband om deze te fixeren. N.B.: bij een MEDIHONEY®HCS Adhesive Border is geen secundair verband nodig!
5. Tussen de verbandwisselingen door mag de wond volgens het standaard reinigingsprotocol gereinigd worden.

WISSELFREQUENTIE

De MEDIHONEY® HCS verbanden dienen te worden vervangen wanneer het verband sterk verdund is door wondvocht. Afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht kan het verband tot 7 dagen op de wond blijven. Indien er verweking van de huid rondom de wond optreedt dient het verband vaker verwisseld te worden.

Belangrijk! Zoals bij alle honingproducten kan er in het begin van de behandeling een toename van de hoeveelheid wondvocht plaatsvinden. Dit is normaal en zal, naarmate de wond schoner wordt, vanzelf verminderen.

BESTELINFORMATIE

Artikel code	Omschrijving	Afmeting	Besteleenheid	Z-index
MHCS780	Medihoney® Hydrogel-Colloïdverband Non-Adhesive	6cmx6cm	doos à 10 stuks	15860698
MHCS781	Medihoney® Hydrogel-Colloïdverband Non-Adhesive	11cmx11cm	doos à 10 stuks	15860701
MHCS782	Medihoney® Hydrogel-Colloïdverband Adhesive Border	7,2cmx7,2cm binnen 11cmx11cm buiten	doos à 10 stuks	15508056
MHCS783	Medihoney® Hydrogel Hydrocolloïdverb Adhesive Border	7,15cmx11,5cm binnen 15cmx15cm buiten	doos à 10 stuks	15860671

