

## Hydrocolloïdverband

**Gebruiksaanwijzing**

23317142 Version 2

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. ©  
2016-01-29

**Productbeschrijving**

Het product is bestemd voor vochtige wondgenezing en wondvochtregeling.

Het product:

- is geïndiceerd voor een grote verscheidenheid van geen tot redelijk veel vocht afgevendende wonden
- is geïndiceerd voor drukulcera
- kan het risico van druk verkleinen

**Informatie**

Het product is een steriel hydrocolloïdverband voor eenmalig gebruik.

Het product bestaat uit:

- drukverlagende schuimringen
- een non-woven plaklaag
- een dampdoorlatende bovenfolie die bacterie- en waterdicht is
- een hydrocolloïde kleefstof
- een doorzichtige beschermfolie en een turquoise beschermfolie

Het product vermindert wondgeur.

Gesteriliseerd d.m.v. bestraling (R).

Als u een vermoedelijke allergische reactie of andere bijwerkingen ondervindt, dient u contact op te nemen met uw zorgverlener.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

**Let op**

Geïnfecteerde wonden, diabetische wonden en wonden die uitsluitend of deels het gevolg zijn van arteriële insufficiëntie moeten regelmatig door een zorgverlener worden geïnspecteerd en behandeld in overeenstemming met de richtlijnen van de instelling.

Het gebruik van andere reinigingsmiddelen dan fysiologische zoutoplossing of kraanwater in combinatie met het product is niet onderzocht.

Het product mag niet worden gebruikt op diepe, ondermijnde drukulcera waar een risico is op inzakken van de wondranden.

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

Houd uit het directe zonlicht.

Bewaar horizontaal.

Bewaar bij kamertemperatuur.

**Waarschuwingen**


Hergebruik van het product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in. Recyclen, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

**Hoe te gebruiken****Vorbereiding**

Reinig de wond en de huid rondom de wond volgens de plaatselijke richtlijnen, bijvoorbeeld met lauw water of fysiologische zoutoplossing.


Dep de huid rondom de wond voorzichtig droog.

Laat de huid rondom de wond drogen alvorens het product aan te brengen indien een film, crème, zalf of vergelijkbaar product wordt gebruikt.

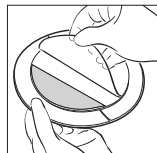**Aansluiten**

Gebruik de turquoise beschermfolie om te voorkomen dat u de zelfklevende kant aanraakt en om aseptische aanbrenging te garanderen.

Verwijder de doorzichtige beschermfolie.

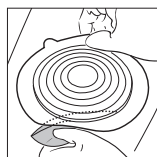


Breng de zelfklevende kant aan op de wond door het verband vanaf één kant op de wond te rollen.

Verwijder de turquoise beschermfolie en druk het verband voorzichtig naar beneden op de huid.



Verwijder het beschermpapier van de non-woven rand en breng de rand voorzichtig aan op de omliggende huid.

Ga voorzichtig met uw vingers over de randen van het product om te controleren of het gelijkmatig en glad aansluit op de huid.

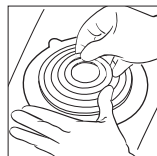

Verwijder maximaal 3 verwijderbare schuimringen zodat er een schuimvrij oppervlak ontstaat dat ongeveer 1,5-2 cm groter is dan de wond.

**Verwijderen**

Het product moet worden verwisseld wanneer dit klinisch geïndiceerd is of na 7 dagen.

Controleer de schuimdikte met regelmatige tussenpozen. Het verband moet worden verwisseld zodra het half zo dik is als toen het werd aangebracht.

Haal het product voorzichtig van de wond en verwijder het product.

Onder het verband kan zich een karakteristieke geur ontwikkelen. Dit is normaal en de geur zal verdwijnen zodra de wond gereinigd is.

**Weggoien afval**

Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden afgevoerd, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.

Spoel het product niet door het toilet.

**Symbolen**

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.



Niet gemaakt van natuurlijke rubberlatex.