

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark**Gebruiksaanwijzing**

23318292 Version 1

Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. Alle rechten voorbehouden. ©
2016-06-17**Productbeschrijving**

Het product is bestemd voor vochtige wondgenezing en wondvochtregeling.

Comfeel Plus is geïndiceerd voor een grote verscheidenheid van geen tot redelijk veel vocht afgevend wonden.

Het product:

- is geïndiceerd voor chronische wonden zoals open been en drukulcera, en acute wonden zoals oppervlakkige brandwonden, oppervlakkige brandwonden van gedeeltelijke dikte, donorlocaties, postoperatieve wonden en schaafwonden
- mag worden gebruikt bij patiënten die worden behandeld voor een plaatselijke of systemische infectie, te beoordelen door een zorgverlener

Informatie

Het product is een steriel hydrocolloïdverband voor eenmalig gebruik.

Het product:

- mag maximaal 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht, de conditie van het verband en het type wond

Het product bestaat uit:

- een dampdoorlatende bovenfolie die bacterie- en waterdicht is
- een meetraster voor controle van de wondgrootte
- een hydrocolloïde kleefstof
- een doorzichtige beschermfolie en turquoise beschermfolies

Het product is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende maten en vormen.

Het product vermindert wondgeur.

Gesteriliseerd d.m.v. bestraling (R).

Als u een vermoedelijke allergische reactie of andere bijwerkingen ondervindt, dient u contact op te nemen met uw zorgverlener.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Let op

Geïnfecteerde wonden, diabetische wonden en wonden die uitsluitend of deels het gevolg zijn van arteriële insufficiëntie moeten regelmatig door een zorgverlener worden geïnspecteerd en behandeld in overeenstemming met de richtlijnen van de instelling.

Het gebruik van andere reinigingsmiddelen dan fysiologische zoutoplossing of kraanwater in combinatie met het product is niet onderzocht.

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

Houd uit het directe zonlicht.

Bewaar horizontaal.

Bewaar bij kamertemperatuur.

Waarschuwingen

Hergebruik van een product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in. Recyclen, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie inhoudt.

Hoe te gebruiken**Vorbereiding**


Reinig de wond en de huid rondom de wond volgens de plaatselijke richtlijnen, bijvoorbeeld met lauw water of fysiologische zoutoplossing.

Dep de huid rondom de wond voorzichtig droog.

Laat de huid rondom de wond drogen alvorens het product aan te brengen indien een film, crème, zalf of vergelijkbaar product wordt gebruikt.


Aansluiten

Kies een product waarbij het verband ten minste 1-2 centimeter over de wondrand uitsteekt.

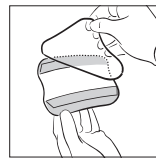


Gebruik de turquoise beschermfolies om te voorkomen dat u de zelfklevende kant aanraakt en om aseptische aanbrenging te garanderen.

Verwijder de doorzichtige beschermfolie.

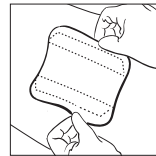

Leg de zelfklevende kant op de wond.

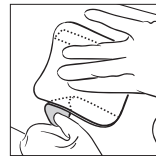

Verwijder één voor één de turquoise beschermfolies. Ga voorzichtig met uw vingers over de randen van het product om te controleren of het gelijkmatig en glad aansluit op de huid.

Na gebruik

Wanneer het product wondvocht absorbeert, vormt zich een witte gel en gaat het product er wit uitzien.

Het product moet worden verwisseld wanneer dit klinisch geïndiceerd is, wanneer er zichtbare tekenen zijn dat wondvocht de rand van het product nadert of na 7 dagen.

Haal de hoeken van het product voorzichtig van de wond en verwijder het product.

Onder het verband kan zich een karakteristieke geur ontwikkelen. Dit is normaal en de geur zal verdwijnen zodra de wond gereinigd is.

Weggoien afval

Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke richtlijnen worden afgevoerd, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.

Spoel het product niet door het toilet.

Symbolen

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.



Niet gemaakt van natuurlijke rubberlatex.