

 Coloplast A/S  
 3050 Denmark  
 IFU10580 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.  
 © 2009-10] Alle rechten voorbehouden aan Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denemarken.

#### Waarschuwing

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel risico voor de gebruiker in. Hergebruik, reinigen, ontsmetten en steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de patiënt een bijkomend risico op lichamelijke letsel of infectie betekent.

#### Let op

Kan naargelang oordeel van een professionele zorgverlener worden gebruikt bij patiënten met lokale en systemische infecties.

Wonden die uitsluitend of hoofdzakelijk door arteriële insufficiëntie worden veroorzaakt of diabetische wonden (voornamelijk onderbenen en voeten) moeten, afhankelijk van de klinische toestand, door een professionele zorgverlener worden gecontroleerd.

Indien een allergische reactie optreedt, dient contact te worden opgenomen met Coloplast voor informatie over de bestanddelen.

Door effectief debridement van necrotisch weefsel kan een wond die met Purilon Gel wordt behandeld er bij de eerste verbandwisseling groter uitzien. Dat is een natuurlijke stap in het genezingsproces.

Alleen voor uitwendig gebruik.

Purilon Gel moet bij kamertemperatuur worden bewaard.

Vermijd direct zonlicht.

Purilon Gel is een steriel product.

Voor eenmalig gebruik.

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is of steriliseer het niet opnieuw.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt bij gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

#### Indicaties

Purilon Gel is hoofdzakelijk geschikt voor de behandeling van wonden met necrotisch weefsel of geel beslag, b.v. ulcus cruris, decubitus en niet geïnfecteerde diabetische voetulcera.

De gel kan ook worden gebruikt bij eerste- en tweedegraads brandwonden.

De gel kan gedurende het hele genezingsproces worden gebruikt om een vochtig wondmilieu te creëren voor alle typen wonden, behalve die onder het kopje "Let op" worden vermeld.

#### Informatie

Purilon Gel is een heldere en amorfe hydrogel voor effectief autolytisch debridement van necrotisch weefsel.

#### Hoe Purilon Gel gebruiken?



Verwijder het etiket van de harmonicaverpakking door aan de hoek te trekken, zoals aangeduid.



Maak de luit onder de afbreekbare punt schoon met een geschikt antiseptisch gaasje.



Verwijder de afbreekbare punt.



Duw voorzichtig onder aan de harmonicaverpakking om de gewenste hoeveelheid Purilon Gel aan te brengen.

Spoel de wond met een fysiologische zoutoplossing of leidingwater. Droog voorzichtig de huid rond de wond.

Breng Purilon Gel voor optimaal resultaat aan zoals op de afbeelding wordt getoond.

De gel in de wond mag niet boven de omliggende huid uitkomen.

Bedek met een secundair verband. Kies bij weinig tot matig exsuderende wonden voor een hydrocolloïd wondverband, zoals Comfeel Plus. Kies bij matig tot ernstig exsuderende wonden voor een sterk absorberend of sterk dampdoortatend verband om de wond te bedekken, zoals Blatrain schuimverbanden.

Voor een optimale reiniging van wonden met necrotisch weefsel of geel beslag moet Purilon Gel minstens om de drie dagen worden vervangen, omdat deze wonden meer exsudaat produceren. Bij schone wonden moet Purilon Gel worden vervangen naargelang de hoeveelheid exsudaat.

De gel kan van de wond worden verwijderd door te spoelen met fysiologische zoutoplossing of leidingwater.

#### Symbool

WO Zendingsoorder. Productienummer ter identificatie van de verpakking van een specifieke order (het LOT-nummer geeft de productiepartij aan).