

# UrgoStart®

## TUL



## FLEXIBELE WONDCONTACTLAAG MET TLC-NOSF

**Indicatie:** chronische wonden/caviteiten op lastige plekken

- **Versnelt de wondgenezing**
- **Herstelt de metabole balans in chronische wonden**
- **Ideaal voor holtes, diepe wonden of wonden op lastige plekken**
- **Pijnloze en atraumatische verwijdering**

# UrgoStart

## TUL


Wordt geleverd in doosjes met per stuk verpakte, gebruiksklare, steriele wondverbanden

Formaat	Stuks per verpakking	Artikelnummer
5 x 7 cm	10	550942
10 x 12 cm	10	550943



# UrgoStart®

## TUL

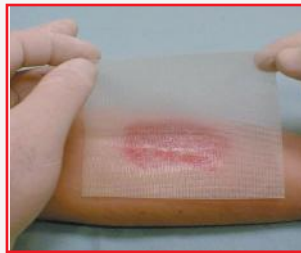

### BESCHRIJVING

■ **UrgoStart Tul** is een flexibele, niet occlusieve lipido-colloïde wondcontactlaag met TLC-NOSF, een innovatieve technologie ontwikkeld door Laboroires Urgo.

**SAMENSTELLING:** UrgoStart Tul bestaat uit een polyester gaas

geïmpregneerd met TLC-NOSF, een formulering van hydrocolloïde deeltjes (carboxymethylcellulose), vaseline en NOSF (Nano-OlygoSaccharide-Factor).

**STERILISATIEMETHODE:** Gesteriliseerd door geïoniseerde straling

### EIGENSCHAPPEN

■ In contact met wondexsudaat wordt de specifieke eigenschap van de combinatie van TLC en NOSF geactiveerd waardoor het genezingsproces wordt geoptimaliseerd.

• Dankzij de hydrocolloïde deeltjes, vormt de TLC een lipido-colloïde gel, waardoor een vochtig wondmilieu wordt gecreëerd dat het genezingsproces bevordert. Hierdoor worden belangrijke cellen die betrokken zijn bij het genezingsproces (fibroblasten, keratinocyten, macrofagen) in staat gesteld hun functie in de wond te vervullen. Aanvullend aan de eigenschappen van TLC vormt NOSF in contact met wondexsudaat een gel die een interactie aan gaat met het micro-milieu van de wond, waar het de versturende werking van MMP's (Matrix Metallo Proteasen) beperkt.

• De combinatie van TLC-NOSF zorgt voor het herstel van de balans in het wondmilieu waardoor chronische wonden weer kunnen gaan granuleren. Dit betreft wonden waarbij een overmaat aan MMP's een metabole disbalans veroorzaakt wat leidt tot een voortdurende afbraak van de extra cellulaire matrix en mogelijk de wondgenezing vertraagt.

■ UrgoStart Tul is flexibel en goed vervormbaar. Hierdoor past het zich aan de contouren van elk type wond aan (ulcus cruris, decubitus, diabetische voet)

■ UrgoStart Tul verkleeft niet aan de wond of de omliggende huid. De verbandwissel is pijnloos voor de patiënt en atraumatisch voor het nieuw gevormde weefsel in de wond.

### INDICATIES

■ **UrgoStart Tul** is geïndiceerd voor de behandeling van chronische wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische voet) en langdurige acute wonden.

■ Flexibel en goed vervormbaar, hierdoor uitermate geschikt voor het behandelen van holtes, diepe wonden of wonden op lastige plekken.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

#### GEBRUIK:

- Voorbereiding van de wond:
  - Reinig de wond volgens lokaal protocol.
  - Als een antisepticum wordt gebruikt, spoel de wond dan voorzichtig met een normale steriele zoutoplossing alvorens **UrgoStart Tul** aan te brengen.
- Aanbrengen van het verband:
  - Verwijder de beschermfolie.
  - Breng **UrgoStart Tul** aan op de wond
  - **UrgoStart Tul** kan op maat worden geknipt met behulp van een steriele schaar om het verband aan de grootte van de wond aan te passen.
  - Bedek **UrgoStart Tul** met een tweede verband dat de hoeveelheid wondexsudaat kan absorberen en fixeert met behulp van een tape, windsel of elastisch buisverband.
  - Voor exsuderende wonden kunt u gebruik maken van **UrgoStart**, de licht klevende schuimverband versie van **UrgoStart Tul**.
- Verwisselen van het verband:
  - **UrgoStart Tul** dient gemiddeld om de 2 tot 4 dagen te worden verwisseld. Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de toestand van de wond kan het verband maximaal tot 7 dagen blijven zitten.
  - De aanbevolen behandelingsduur bedraagt minimaal 4 tot 5 weken.

#### VOORZORGSMATREGELEN

- **UrgoStart Tul** hecht zich aan chirurgische latex handschoenen. Daarom is het aan te bevelen om de handschoenen met een fysiologische zoutoplossing te bevochtigen om het gebruik van **UrgoStart Tul** te vergemakkelijken.

■ Indien tekenen van kritische kolonisatie aanwezig zijn wordt aanbevolen dit eerst adequaat te behandelen voordat u begint met **UrgoStart Tul**.

■ Gezien het ontbreken van klinische data wat betreft de eerstelijnsbehandeling van acute wonden en de behandeling van erfelijke epidermolysis bullosa (zelfs bij aanhoudende laesies), wordt afgeraden om **UrgoStart Tul** te gebruiken.

■ In geval van diepe wonden en fistels dient een deel van het verband zichtbaar te blijven om het makkelijk te kunnen verwijderen.

■ Bij een atypische ulcus die verhard is of overmatig granuleert mag **UrgoStart Tul** alleen gebruikt worden nadat is gecontroleerd of er geen sprake is van een wondgerelateerde maligniteit, om het stellen van een diagnose niet te vertragen.

■ De genezende werking van **UrgoStart Tul** kan aan het begin van de behandeling mogelijk gepaard gaan met een stekend of pijnlijk gevoel. Dit is zelden reden om de behandeling te onderbreken.

■ Voor éénmalig gebruik. Per stuk steriel verpakt. Het verband niet opnieuw gebruiken om risico op infecties te voorkomen.

■ Het verband niet opnieuw steriliseren.

#### CONTRAINDICATIES

■ Om een optimale behandeling niet te vertragen is **UrgoStart Tul** gecontra-indiceerd voor oncologische wonden en wonden met een fistel waaronder zich een diep abces kan bevinden.

• Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor **UrgoStart Tul** of voor één van de bestanddelen.